











Des pansements ont changé dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?									
Hydrogel <ul style="list-style-type: none">✚ Débridement autolytique✚ Absorption : aucun exsudat ou faible✚ Procure un milieu humide✚ Comble un espace mort en association avec compresse ou mèche, sous un pansement interactif Jamais dans les plaies infectées	NU-GEL™ 	PURILON™ 	Même indication et utilisation au niveau des plaies.  Utilisation UNIDOSE : ne peut pas être refermé, et doit être jeté après utilisation . <table><tr><td>Tube uni-service</td><td>Prix</td><td>GRM</td></tr><tr><td>8 g.</td><td>1.83\$</td><td>1200005118</td></tr></table>	Tube uni-service	Prix	GRM	8 g.	1.83\$	1200005118			
Tube uni-service	Prix	GRM										
8 g.	1.83\$	1200005118										
Alginate de calcium à base d'argent <ul style="list-style-type: none">✚ Absorption : exsudats modérés à abondants✚ Effet antimicrobien✚ Plaie colonisée/infectée	SILVERCEL™ 	RESTORE ALGinate DE CALCIUM AVEC ARGENT™ 	Le nouveau produit est blanc, et il a les mêmes caractéristiques.  Faire dépasser que très peu des berges de la plaie. <table><tr><td>Grandeur</td><td>Prix</td><td>GRM</td></tr><tr><td>10cm x 12.5cm</td><td>3.75\$</td><td>1100005231</td></tr><tr><td>5cm x 5 cm</td><td>2.00\$</td><td>1200005234</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10cm x 12.5cm	3.75\$	1100005231	5cm x 5 cm	2.00\$	1200005234
Grandeur	Prix	GRM										
10cm x 12.5cm	3.75\$	1100005231										
5cm x 5 cm	2.00\$	1200005234										
Alginate de calcium <ul style="list-style-type: none">✚ Absorption : exsudat modéré à abondant✚ Prévient la macération✚ Comble l'espace mort avec un <u>lit de plaie visible</u><ul style="list-style-type: none">* Privilégier l'alginate en cas de saignement léger pour sa propriété hémostatique. <u>Attention</u> : ne contrôle pas l'hémorragie.	KALTOSTAT™ 	À VENIR										






Hydrofera blue 120000 2913

Tubigrip F 110000 2748





Des pansements ont changés dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?															
Fibre gélifiante avec fibre de renfort <ul style="list-style-type: none">Absorbe et retient les exsudats (plaies modérément à fortement exsudatives).Crée un gel cohésif dans le lit de plaieMaintient un milieu humideFavorise la détersion autolytique.Limite les risques de macération au niveau des berges	AQUACEL™ 	AQUACEL EXTRA™ 	<p>Même indication et utilisation au niveau des plaies.</p> <p>! Différence : contient un tramage qui permet de le retirer plus facilement sans laisser de résidu.</p> <p>! Maintenant disponible : <u>la mèche à utiliser de manière judicieuse, dans des cavités de plaies qui sont visibles à l'œil.</u></p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>Mèche 1 x 45 cm</td><td>7.95\$</td><td>1200002763</td></tr><tr><td>Mèche 2 x 45 cm</td><td>7.42\$</td><td>1200002764</td></tr><tr><td>10 x 10 cm</td><td>5.85\$</td><td>1200002808</td></tr><tr><td>15 x 15 cm</td><td>12.43\$</td><td>1200002807</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	Mèche 1 x 45 cm	7.95\$	1200002763	Mèche 2 x 45 cm	7.42\$	1200002764	10 x 10 cm	5.85\$	1200002808	15 x 15 cm	12.43\$	1200002807
Grandeur	Prix	GRM																
Mèche 1 x 45 cm	7.95\$	1200002763																
Mèche 2 x 45 cm	7.42\$	1200002764																
10 x 10 cm	5.85\$	1200002808																
15 x 15 cm	12.43\$	1200002807																
Fibre gélifiante avec argent <ul style="list-style-type: none">Absorbe et retient les exsudats (plaies modérément à fortement exsudatives).Crée un gel dans le lit de plaieMaintient un milieu humideFavorise la détersion autolytique.Limite les risques de macération au niveau des bergesAction antimicrobienne	Pas d'équivalent dans l'hôpital	AQUACEL® Ag EXTRA™ 	<p>Utilisation identique à la fibre gélifiante avec fibre de renfort.</p> <p>! La différence avec la fibre gélifiante avec fibre de renfort est l'argent qui a un effet antimicrobien. À utiliser donc sur des plaies infectées – colonisées.</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>1x45cm</td><td>8.99\$</td><td>1200005336</td></tr><tr><td>10 X 10</td><td>8.20\$</td><td>1200002805</td></tr><tr><td>15 X 15</td><td>18.20\$</td><td>1200003106</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	1x45cm	8.99\$	1200005336	10 X 10	8.20\$	1200002805	15 X 15	18.20\$	1200003106			
Grandeur	Prix	GRM																
1x45cm	8.99\$	1200005336																
10 X 10	8.20\$	1200002805																
15 X 15	18.20\$	1200003106																
Non –adhérent imprégné lipido-colloïde <ul style="list-style-type: none">Protège le lit de la plaieMinimise le traumatisme et la douleur lors du retrait de pansementPeut être utilisé en interface avec la thérapie de plaie à pression négative (TPPN)	ADAPTIC™ 	RESTORE TRIAC FLEX™ 	<p>Même indication à la différence qu'il est imprégné d'un lipido-colloïde, ce qui produit un gel au contact de l'exsudat.</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>5X5cm</td><td>2.47\$</td><td>1100002244</td></tr><tr><td>10X12.5cm</td><td>4.30\$</td><td>1100002237</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	5X5cm	2.47\$	1100002244	10X12.5cm	4.30\$	1100002237						
Grandeur	Prix	GRM																
5X5cm	2.47\$	1100002244																
10X12.5cm	4.30\$	1100002237																










Des pansements ont changés dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?																		
Hydrocolloïde 🚦 Crée un environnement humide pour les plaies superficielles peu ou pas exsudatives 🚦 Favorise un débridement autolytique 🚦 Réduit la friction 🚦 Protège les berges avec la TPPN Jamais sur les plaies infectées	DUODERM™ 	COMFEEL™ 	Même indication et utilisation au niveau des plaies, plus mince et plus transparent. <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>10X10cm</td><td>0.88\$</td><td>1001004942</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10X10cm	0.88\$	1001004942												
Grandeur	Prix	GRM																			
10X10cm	0.88\$	1001004942																			
Mousse hydrocellulaire 🚦 Absorption : exsudats modérés 🚦 Permet les échanges gazeux 🚦 Garde le milieu relativement humide selon les besoins de la plaie	BIATAIN™2 grandeurs 	BIATAIN™ Soft Hold 3 grandeurs BIATAIN™ 2 grandeurs 	<p>❗ La partie que l'on colle à la plaie (la partie blanche) du BIATAIN™ Soft Hold est enduite de silicone, ce qui la rend légèrement adhésive. Retirer la pellicule qui la recouvre pour l'application.</p> <p>🟢 On continue à border la mousse avec l'adhésif approprié (Opsite™ – Hypafix™ – etc)</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>5X7cm</td><td>1.28\$</td><td>1001004829</td></tr><tr><td>10x10cm</td><td>2.05\$ silicone</td><td>1200005137</td></tr><tr><td>10x20cm</td><td>2.16\$ silicone</td><td>1200005138</td></tr><tr><td>15x15cm</td><td>4.60\$ silicone</td><td>1200005139</td></tr><tr><td>20x20cm</td><td>8.82\$</td><td>1200002767</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	5X7cm	1.28\$	1001004829	10x10cm	2.05\$ silicone	1200005137	10x20cm	2.16\$ silicone	1200005138	15x15cm	4.60\$ silicone	1200005139	20x20cm	8.82\$	1200002767
Grandeur	Prix	GRM																			
5X7cm	1.28\$	1001004829																			
10x10cm	2.05\$ silicone	1200005137																			
10x20cm	2.16\$ silicone	1200005138																			
15x15cm	4.60\$ silicone	1200005139																			
20x20cm	8.82\$	1200002767																			
Mousse hydrocellulaire avec gel adhésif siliconé 🚦 Absorption : exsudats légers à modérés 🚦 Permet les échanges gazeux 🚦 Garde le milieu relativement humide 🚦 Ne nécessite pas d'adhésif supplémentaire	Pas d'équivalent dans l'hôpital	ALLEVYN GENTLE BORDER™ 4 grandeurs 	Adhésif doux : Retrait moins traumatique pour les peaux environnantes fragiles. Imperméable pour la douche. <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>5X5cm</td><td>1.90\$</td><td>1200005136</td></tr><tr><td>7.5x7.5cm</td><td>2.33\$</td><td>1200002768</td></tr><tr><td>10x10cm</td><td>1.60\$</td><td>1200002769</td></tr><tr><td>15x15cm</td><td>6.52\$</td><td>1200002770</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	5X5cm	1.90\$	1200005136	7.5x7.5cm	2.33\$	1200002768	10x10cm	1.60\$	1200002769	15x15cm	6.52\$	1200002770			
Grandeur	Prix	GRM																			
5X5cm	1.90\$	1200005136																			
7.5x7.5cm	2.33\$	1200002768																			
10x10cm	1.60\$	1200002769																			
15x15cm	6.52\$	1200002770																			

Des pansements ont changés dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?															
<p>Multi couches avec recouvrement adhésif imperméable</p> <ul style="list-style-type: none">Absorption : exsudat légerDébridement avec hydrogel sur plaie superficielle peu exsudativeImperméable à la douche	<p>Pas d'équivalent dans l'hôpital</p>	<p>DUDRESS™</p> 	<p>! Parfait pour une plaie superficielle faiblement exsudative, ou lors d'un débridement autolytique !</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>10x10cm</td><td>1.25\$</td><td>1200005114</td></tr><tr><td>15x20cm</td><td>2.73\$</td><td>1200005115</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10x10cm	1.25\$	1200005114	15x20cm	2.73\$	1200005115						
Grandeur	Prix	GRM																
10x10cm	1.25\$	1200005114																
15x20cm	2.73\$	1200005115																
<p>Coussinet</p> <ul style="list-style-type: none">Absorption : plaies fortement exsudatives<ul style="list-style-type: none">➤ Bris cutané a/n membres inférieurs➤ Néoplasie cutanée ou métastase cutanée	<p>MESORB™ 1 grandeur</p> 	<p>MESORB™ 4 grandeurs</p> 	<p>! Utile pour les plaies qui sont fortement exsudatives avec réfection fréquente.</p> <p>! Peut être utilisé en pansement primaire, ou secondaire (non-adhérent, alginate, fibre gélifiante, anti-odeur, etc)</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>10 X 10 ✓</td><td>0.39\$</td><td>1200002903</td></tr><tr><td>10 X 20</td><td>0.69\$</td><td>1200002896</td></tr><tr><td>15X20</td><td>0.79\$</td><td>1200002897</td></tr><tr><td>20X30 ✓</td><td>1.39\$</td><td>1200001705</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10 X 10 ✓	0.39\$	1200002903	10 X 20	0.69\$	1200002896	15X20	0.79\$	1200002897	20X30 ✓	1.39\$	1200001705
Grandeur	Prix	GRM																
10 X 10 ✓	0.39\$	1200002903																
10 X 20	0.69\$	1200002896																
15X20	0.79\$	1200002897																
20X30 ✓	1.39\$	1200001705																
<p>Mèche absorbant imprégné de chlorure de sodium</p> <ul style="list-style-type: none">Absorption : plaies moyennement et fortement exsudatives seulementPermet de nettoyer les plaiesConvient aux plaies infectées en phase inflammatoire	<p>Pas d'équivalent dans l'hôpital</p>	<p>MESALT™</p> 	<p>! Utile pour les petites plaies très exsudatives qui persistent dans leurs phases inflammatoires. Elles peuvent contenir des tissus nécrotiques humides et/ou être infectées.</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>2x100cm</td><td>4.23\$</td><td>1200002078</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	2x100cm	4.23\$	1200002078									
Grandeur	Prix	GRM																
2x100cm	4.23\$	1200002078																

Des pansements ont changé dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?												
Non- adhérent imprégné de corps gras <ul style="list-style-type: none">Protège le lit de la plaieMinimise le traumatisme et la douleur lors du retrait de pansementPeut être utilisé en interface avec la thérapie de plaie à pression négative (TPPN)Peut être associé avec des produits topiques	JELONET™ 1 grandeur Sur les unités de soins 	JELONET™ 3 grandeurs dont 2 sur demande. 	Même indication et utilisation pour le 10 x 10cm  Les 2 autres grandeurs utilisées pour les Grands Brûlés ou les patients avec des diagnostics avec de maladies bulleuses, auto-immunes, allergiques ou plaies de grandes surfaces <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>10 X10cm</td><td>0.44\$</td><td>1100004574</td></tr><tr><td>*10x40cm</td><td>1.08\$</td><td>1200001719</td></tr><tr><td>*10x7m</td><td>18.18\$</td><td>1200005071</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10 X10cm	0.44\$	1100004574	*10x40cm	1.08\$	1200001719	*10x7m	18.18\$	1200005071
Grandeur	Prix	GRM													
10 X10cm	0.44\$	1100004574													
*10x40cm	1.08\$	1200001719													
*10x7m	18.18\$	1200005071													
Anti-odeur avec argent <ul style="list-style-type: none">Contrôle les odeursAction antibactérienne	ACTISORB SILVER 220™ 1 grandeur 	ACTISORB SILVER 220™ 2 grandeurs 	Même indication et utilisation, mais une grandeur disponible en plus ! <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>10.5X10.5cm</td><td>3.82\$</td><td>1010007809</td></tr><tr><td>10.5X19cm</td><td>7.11\$</td><td>1200005117</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	10.5X10.5cm	3.82\$	1010007809	10.5X19cm	7.11\$	1200005117			
Grandeur	Prix	GRM													
10.5X10.5cm	3.82\$	1010007809													
10.5X19cm	7.11\$	1200005117													
Pansement antimicrobien 100% coton imprégné avec 0.2% Polyhexamethylene Biguanide (PHMB) <ul style="list-style-type: none">Rouleau de coton pour remplir des cavités profondesMèche pour les cavités plus petites ou le fond de la plaie est visible	Pas d'équivalent dans l'hôpital	KERLIX AMD™ CURITY AMD™ MÈCHE 	 Peuvent être insérées humides ou sec dans la cavité.  Ne pas compacter et insérer <u>la mèche en un seul morceau</u>  Noter le nombre de rouleau inséré dans la cavité sur le <u>pansement extérieur ET dans les notes inf.</u> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>11.4cmX3.7m</td><td>3.00\$</td><td>1200002906</td></tr><tr><td>1.3cmX0.9m</td><td>1.60\$</td><td>1200002201</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	11.4cmX3.7m	3.00\$	1200002906	1.3cmX0.9m	1.60\$	1200002201			
Grandeur	Prix	GRM													
11.4cmX3.7m	3.00\$	1200002906													
1.3cmX0.9m	1.60\$	1200002201													

Des pansements ont changés dans l'hôpital !

Type de pansement	AVANT	MAINTENANT	Ça change quoi pour moi ?									
<p>Pansement non-adhérent antimicrobien à base d'iode</p> <ul style="list-style-type: none">✚ Pour les plaies colonisées / infectées✚ Application sur le lit de plaie avec ou sans exsudat✚ S'assurer que le patient n'est pas allergique à l'iode✚ Peut être utilisé en interface avec la thérapie de plaie à pression négative (TPPN)	<p>Pas d'équivalent dans l'hôpital</p>	<p>INADINE™</p> 	<p>Le pansement est un tulle de couleur marron imprégné d'iode. Il est à appliquer directement sur le lit de la plaie.</p> <p>⚠ Lorsque la couleur marron s'estompe, c'est signe qu'il y a une perte d'efficacité et qu'il faut changer le pansement.</p> <table><tr><th>Grandeur</th><th>Prix</th><th>GRM</th></tr><tr><td>5x5cm</td><td>1.19\$</td><td>1200002813</td></tr><tr><td>9.5x9.5cm</td><td>1,77\$</td><td>1200002814</td></tr></table>	Grandeur	Prix	GRM	5x5cm	1.19\$	1200002813	9.5x9.5cm	1,77\$	1200002814
Grandeur	Prix	GRM										
5x5cm	1.19\$	1200002813										
9.5x9.5cm	1,77\$	1200002814										

Adaptic : 11 0000 22 44

Duoderm: 100100 49 42

Bandage ouaté orthopédique 6" x 4m : 1001 00 83 02